

# ANIOS RHW

Rinçant  
Lubrifiant de  
l'instrumentation



- Lubrifiant avec activateur de séchage
- Utilisable avec toute qualité d'eau (brute ou traitée)
- Haute compatibilité avec les polysulfones
- Spécialement adapté pour une combinaison avec ANIOSYME DLM Maxi ou ACTANIOS LDI

## INDICATIONS

Rinçant avec effet lubrifiant pour les instruments chirurgicaux et médicaux. Activateur de séchage particulièrement recommandé pour l'utilisation en machine alimentée en eau non osmosée.

## CARACTERISTIQUES

- Liquide limpide incolore
- pH du produit pur à 20°C: 2 à 3
- pH à la dilution de 0,2%: env. 7
- Densité à +20°C: 1,03
- Non oxydant



DILUTION  
AUTOMATIQUE  
soit 0,3 à 3 ml -> 1 L



# ANIOS RHW

Rinçant lubrifiant de l'instrumentation

## MODE D'EMPLOI

Solution concentrée pour usage professionnel.

Utilisation aux dilutions automatiques de 0,03 à 0,3% (soit 0,3 à 3 ml par litre d'eau) en eau froide ou chaude selon le type de machine.

ANIOS RHW est compatible avec les cycles de désinfection thermique.

## COMPOSITION

Tensioactifs non ioniques et anioniques, isopropanol, excipients.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).

Stockage : entre +5°C et +30°C.

Dispositif médical de classe I (Directive 93/42/CEE modifiée).

## CONDITIONNEMENTS

2 bidons de 5 litres .....	Ref. : 1813.038
2 bidons de 5 litres .....	Ref. : 1813.015
1 bidon de 10 litres .....	Ref. : 1813.024

