

# STERANIOS 2%

STERANIOS 2% NG - STERANIOS 2% ECS

Désinfectant  
de Haut Niveau /  
Stérilisant à froid



- Solution prête à l'emploi : absence d'activateur
- Actif sur bactéries, levures, moisissures, virus et mycobactéries en 10 minutes
- Actif sur spores de bactéries en 1 heure
- Vérification de l'efficacité du bain par bandelette spécifique (toutes les 4 heures)
- Conservation du bain de trempage : 30 jours

## INDICATIONS

Désinfection de haut niveau / Stérilisation à froid des dispositifs médicaux, du matériel chirurgical et médical, du matériel d'endoscopie et du matériel thermosensible.

## CARACTERISTIQUES

- Solution limpide de couleur verte.
- Actif sur Helicobacter pylori.
- Solution à 2% de Glutaraldéhyde tamponnée à pH6 (Citrates de sodium).
- STERANIOS 2% NG et STERANIOS 2% ECS sont formulés avec des composés qui limitent et contrôlent l'évaporation du glutaraldéhyde.
- Sporidie complète (5 log de réduction).
- Large compatibilité avec tout type de matériaux.
- Péréemption : 3 ans à partir de la date de fabrication.
- S'utilise en association à tout type de produit nettoyant pré-désinfectant.

PRÊT A  
L'EMPLOI






# STERANIOS 2%

STERANIOS 2% NG - STERANIOS 2% ECS

Désinfectant de Haut Niveau / Stérilisant à froid

## MODE D'EMPLOI

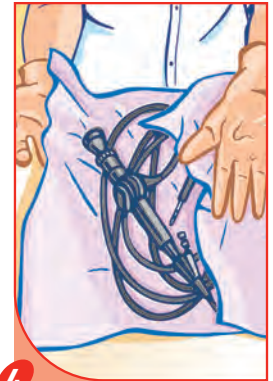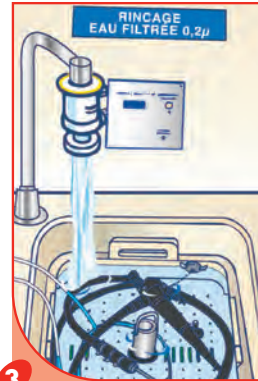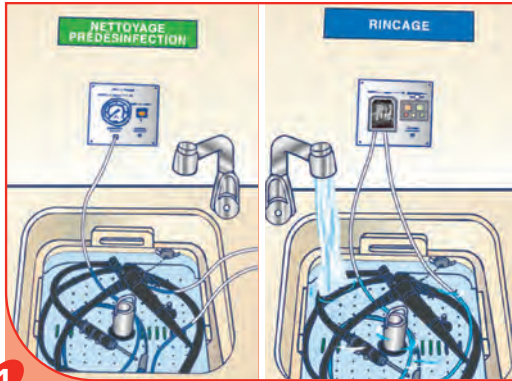

**1** **Etape de pré-désinfection :** Nettoyer le dispositif médical avec un produit type ANIOSYME DD1, HEXANIOS G+R, ou ANIOSYME PLA II. Rincer soigneusement. Pour le matériel endoscopique : écouvillonner et irriguer.

**2** **Etape de désinfection :** verser la solution. Couvrir le bac. **Temps de contact : 10 min. ou 1 heure** selon l'activité recherchée. Temps de conservation maximum du bain de trempage : 30 jours.

**3** Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau stérile ou filtrée (0,2µm). Pour le matériel endoscopique : extérieur et intérieur.

**4** Essuyer avec un champ à usage unique. Conserver le dispositif médical le plus aseptiquement possible jusqu'à nouvelle utilisation.

## COMPOSITION

STERANIOS 2% est une solution de glutaraldéhyde à 2% (exprimé en matière active à 100%), tamponnée à pH 6 en présence d'un catalyseur d'effets de surface. STERANIOS 2% NG et STERANIOS 2% ECS contiennent 2 composés qui, en association, limitent l'évaporation du glutaraldéhyde.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respecter les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques) Stockage entre +5°C et +35°C. Dispositif médical de la classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée).

## CONDITIONNEMENTS

- 1** STERANIOS 2% 4 bidons de 5L.....Réf 382.034
- 2** STERANIOS 2% NG 4 bidons de 5L.....Réf 383.034
- 3** STERANIOS 2% ECS 4 bidons de 5L.....Réf 710.034

## PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 13727, EN 14561	5 minutes
	Actif sur Helicobacter pylori	10 minutes
Mycobactéries	EN 14348, EN 14563	10 minutes
	Actif sur Mycobacterium massiliense	10 minutes
Levures / Moisissures	EN 1275, EN 13624, EN 14562	10 minutes
Virus	EN 14476 : Poliovirus, Adénovirus, MNV	10 minutes
	Actif sur HIV-1, HBV, BVDV (virus modèle HBV) et HSV	5 minutes
Spores	NF T 72-230/231 : Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes	60 minutes
	Actif sur Clostridium difficile	30 minutes
Mycoplasmes urogénitaux		5 minutes

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.

