

SURFANIOS Premium

Détergent désinfectant
sols et surfaces



- Produit combinant les actions détergente et désinfectante en une opération simultanée
- Efficacité démontrée sur bactéries et moisissures isolées de l'environnement hospitalier
- Produit formulé sans aldéhyde
- Optimisation des données écotoxicologiques


INDICATIONS

Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à réflexes...).

CARACTÉRISTIQUES

- Solution de couleur verte
- pH à dilution (0.25%) en eau de réseau : environ 8.0
- Densité : 1,007
- Indice de Réfraction : 1,3587

PRODUIT À DILUER
20 ml → 8 L

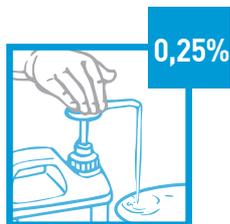

SURFANIOS Premium

Détergent désinfectant sols et surfaces

MODE D'EMPLOI



1 Remplir un seau de lavage avec 8 litres d'eau. **Dilution à 0,25%** : Verser une dose de 20 ml de SURFANIOS PREMIUM dans le seau de lavage.



2 Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage en respectant le schéma de nettoyage : du fond vers la sortie. Le rinçage est inutile sauf si les zones à traiter sont destinées à être en contact avec la peau ou les muqueuses.



3 Changer de franges autant de fois que nécessaire. Mettre la frange sale dans le récipient prévu à cet effet.



4 Après le nettoyage de chaque secteur, changer la frange, renouveler la solution de lavage.

COMPOSITION

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 51mg/g), chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 25mg/g), excipients.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Stockage : entre +5°C et +35°C. Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (Groupe 1-TP 2) - usage réservé aux professionnels. Dispositif médical de la classe IIa (Directive 93/42/CEE modifiée).

CONDITIONNEMENTS

SURFANIOS Premium

- 1 500 sachets de 20 ml.....Réf. 1917.129
- 2 12 flacons doseurs de 1 litre.....Réf. 1917.092
- 3 4 bidons de 5 litres avec 1 pompe doseuse de 20 ml.....Réf. 1917.036

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 13727	5 minutes
	EN 13697, EN 16615	15 minutes
	BMR selon EN 13697	15 minutes
Mycobactéries	Mycobacterium terrae : EN 14348, EN 14563	60 minutes / 0.25% 30 minutes / 0.5%
	Levures	EN 1275, EN 13624, EN 16615
EN 13697		30 minutes / 0.25% 15 minutes / 0.5%
		Moisissures
EN 13697	30 minutes	
Virus	Selon EN 14476 : HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, HSV, Vaccinia virus	5 minutes
	Selon EN 14476 : Coronavirus (virus modèle SRAS)	15 minutes

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.

